

CO₂ THERAPY

**APARAT ZA TERAPIJU
UGLJEN-DIOKSIDOM (CO₂)**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Aparat za terapiju ugljen-dioksidom (CO₂)

UVOD

Aparat **THERAPY CO₂** je mikroprocesorski kontrolisan aparat za terapiju ugljen-dioksidom. Koristi se za profesionalnu upotrebu u fitness centrima, kozmetičkim salonima i dr.

Kvalitet **THERAPY CO₂** aparata potvrđen je garantnim rokom od **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium**.

TERAPIJA UGLJEN-DIOKSIDOM

Najnovija metoda borbe protiv celulita i masnih naslaga.

Zahvaljujući BOHR'S efektu prilikom terapije ugljen-dioksidom povećava se koncentracija kiseonika na periferiji. Povećana koncentracija kiseonika sprečava nagomilavanje tečnosti između ćelija, a takođe brzo i efikasno sagoreva masti.

Pored brzog sagorevanja masti i celulita, ojačava se i vezivno tkivo što uzrokuje zatezanje kože.

APARAT CO₂

OPIS APARATA

Komplet **CO₂** se sastoji od

- Aparata za terapiju ugljen-dioksidom (u daljem tekstu *aparat*)
- Boce, creva, kese i ostale prateće opreme

Na prednjoj strani aparata se nalazi

- Preklopnik aktivnosti aparata **POWER ON**
- *Soft-touch* taster za početak/završetak rada **START/STOP**
- *Soft-touch* taster za podešavanje vremena **TIME**
- Displej vremena tretmana (u **min**)
- Zeleno dugme za vacuum **PUMP/VAC**
- Crveno dugme za ugljen-dioksid **CO₂**
- LED dioda aktivnosti pumpe vazduha **ON/OFF**
- LED dioda aktivnosti pumpe ugljen-dioksida **ON/OFF**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priključiti kabl mrežnog napajanja u 220 V utičnicu.

Iseći kesu na potrebnu dužinu (klijent navlači kesu do nivoa ispod grudi).

Kesa se u visini grudi zatvara (osigura) rastegljivom trakom, dok se drugi kraj (kod nogu), nakon ubacivanja creva za gas, zatvora (osigura) lepljivom trakom.

Preklopnikom **ON/OFF**, uključiti aparat.

Pritiskom na zeleno dugme za vacuum **PUMP/VAC** uključiti pumpu koja izvlači vazduh iz kese. Kada je kesa prazna, ponovnim pritiskom na zeleno dugme za vacuum **PUMP/VAC** isključiti pumpu.

Aparat za terapiju ugljen-dioksidom (CO₂)

Pritiskom na crveno dugme za ugljen-dioksid **CO₂** uključiti pumpu koja ubacuje **CO₂** u kesu. Kada je kesu blago popunjena (punjenje kese je sporo, jer bi brže punjenje izazvalo nisku temperaturu u kesu), ponovnim pritiskom na crveno dugme za ugljen-dioksid **CO₂** isključiti pumpu.

Soft-touch tasterom **TIME**, podesiti željeno vreme trajanja tretmana (displej pokazuje vreme u **minutima**).

Pritiskom na *soft-touch* taster **START/STOP**, počinje tretman ugljen-dioksidom. (**Napomena:** *Soft-touch* taster **START/STOP** je potrebno držati pritisnutim oko 2-3 sekunde, dok se ne pojavi zvučni signal).

Nakon isteka vremena tretmana, aparat se automatski isključuje. Pritiskom na zeleno dugme za vacuum **PUMP/VAC** uključiti pumpu koja izvlači **CO₂** iz kese (kesa se prazni brže od punjenja). Crevo koje izbacuje **CO₂**, sprovesti van prostorije.

Preklopnikom **ON/OFF**, isključiti aparat. Za sledeći tretman, ponoviti prethodno opisan postupak.

Tretman se u bilo kom trenutku može prekinuti pritiskom na *soft-touch* taster **START/STOP**.

Važna napomena: **OBAVEZNO PROVETRITI PROSTORIJU NAKON TERAPIJE !!!**

Napomena: u toku terapije, nije moguće uključiti pumpu za vacuum ili CO₂.

VEOMA VAŽNE NAPOMENE:

- GLAVNI VENTIL na boci otvara se suprotno od smeru kazaljke na satu (zatvara se u kontra smeru)
- Kazaljka levog manometra (pokazuje visoki pritisak), može da pokaže pritisak, i ako je zatvoren GLAVNI VENTIL
- Kazaljka desnog manometra (pokazuje nizak pritisak), može da pokaže pritisak, i ako je zatvoren GLAVNI VENTIL
- DONJE veliko crno dugme, na REDUCIRU PRITISKA, suprotno od kazaljke na satu smanjuje pritisak u cevima (u kontra smeru povećava). Obratiti pažnju da ovaj pritisak treba da bude max 9 bara.
- DESNO malo crno dugme na REDUCIRU PRITISKA u smeru kazaljke na satu zatvara izlaz gasa prema cevi (u kontra smeru otvara protok gasa prema cevima)
- **Posle završenog radnog dana obavezno zatvoriti glavni ventil**
- **Ostale ventile ne podešavati bez potrebe**
- **Pritisak u cevima je podesen na 9 bara i nije dozvoljeno menjati ga (ne sme se povećavati) zbog sigurnosti ventila. Može se smanjiti do 6 bara**

UPUTSTVO ZA PRIMENU

- Preporučuje se da vreme terapija iznosi 30 minuta
- Preporučuje se da minimalno vreme između terapija iznosi 24 časa
- Preporučuje se 10 terapija u jednom ciklusu
- Preporučuje se pauza između ciklusa od 15 dana

Aparat za terapiju ugljen-dioksidom (CO₂)

INDIKACIJE

Aparat **THERAPY CO₂** ima širok spektar primene u medicini i kozmetologiji. Neke od osnovnih indikacija su:

- Celulit
- Masne naslage
- Strije
- Detoksikacija
- Zatezanje kože
- Estetske promene (gubitak elasticiteta)
- Ubrzava regeneraciju organizma nakon fizičkih aktivnosti

KONTRAINDIKACIJE

- Ugrađeni pace-maker
- Dijagnostikovano srčano oboljenje, bez stvarne procene rizika
- Nedijagnostikovani bolni sindromi, bez konstatacije uzroka bolesti
- Maligni tumori i prekanzerozna stanja
- Krvarenje i sklonost ka krvarenju
- Trudnoća

UPOZORENJA

- Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu
- Nakon korišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Za vreme čišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Ne stavljati aparat na metalne površine i električne aparate
- Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tečnostima
- Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi
- Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece
- Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji oštećeni deo
- Ne skladištiti aparat na direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlazi
- Ne modifikovati i ne menjati neovlašćeno komponente aparata

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

- Aparat brisati isključivo suvom krpom, bez upotrebe sredstava za čišćenje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	HX-F7
Napon napajanja	220 V, 50-60 Hz
Električna potrošnja	do 2.200 W
Timer	Da
Dimenzija (cm)	-
Težina kompleta (kg)	-

Pribor:

- Boca sa CO₂ za 30-50 terapija
- Beskonačna kesa u rolni oko 20-30 kg

Aparat za terapiju ugljen-dioksidom (CO₂)

GARANTNI LIST

Marka aparata: **HAROX**
Naziv aparata: **THERAPY CO₂**
Model aparata: **THERAPY CO₂**
Verzija aparata: **Standard / Premium**
Serijski broj:
Datum prodaje:

GARANTNA IZJAVA

- Isporučilac garantuje da će aparat ispravno funkcionisati, ukoliko se pravilno upotrebljava i održava prema uputstvu.
- Garantni rok iznosi **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium** računajući od datuma kupovine.
- Garancija je važeća ukoliko je ispravno popunjena i overena datumom prodaje, serijskim brojem aparata, pečatom i potpisom prodavca.
- Isporučilac se obavezuje da će u garantnom roku otkloniti sve nedostatke koji eventualno nastanu kod pravilne upotrebe aparata u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 60 dana (u toku popravke aparata garantni rok se produžava za taj period). Ukoliko isporučilac u garantnom roku ne otkloni eventualne funkcionalne nedostatke, obavezuje se da aparat zameni novim istog modela.
- Isporučilac se obavezuje da obezbedi rezervne delove najmanje 1 godinu nakon isteka garantnog roka.
- Garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko se pažljivo ne pročita uputstvo), oštećenja nastala tokom transporta do kupca, mehanička oštećenja, oštećenja prouzrokovana elementarnim nepogodama, ekstremnim temperaturama, uticajem vlage i hemikalija, oštećenja usled nestanka ili dolaska mrežnog napona dok je aparat uključen, kao i ukoliko aparat otvaraju, popravljaju ili prepravljaju neovlašćena lica.
- Garancija ne pokriva potrošne delove aparata (trake, prostirke, sunđere, glave, pincete, elektrode, kablove sa pripadajućim džekovima i štipaljkama i dr). Garancija nije važeća u slučaju nenamernog ili namernog kratkospajanja elektroda (ili štipaljki) dok je aparat uključen.
- Garancija ne važi (i proizvođač ne snosi odgovornost) za korišćenje aparata u svrhe izvan njegove namene. Proizvođač nije odgovoran za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje aparata moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.
- Za sve informacije i reklamacije molimo Vas da se obratite ovlašćenom serviseru.

Ovlašćeni servis:

Potpis i pečat prodavca

065/227-15-15