

RADIO-WAVE LIFTING

HX-W7

APARAT ZA RADIO-TALASNI LIFTING LICA I TELA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Aparat za radio-talasni lifting lica i tela (RTL)

UVOD

Aparat **RADIO-WAVE LIFTING** je mikroprocesorski kontrolisan aparat za radio-talasni lifting lica i tela. Koristi se za profesionalnu upotrebu u kozmetičkim salonima.

Kvalitet **RADIO-WAVE LIFTING** aparata potvrđen je garantnim rokom od **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium**.

LIFTING LICA I TELA

Aparat za radio-talasni lifting lica i tela **RADIO-WAVE LIFTING HX-W7** predstavlja generator vrlo visoke frekvencije koja izuzetno blagotvorno deluje na kožu i tkivo. Proizvodi kontrolisane radio-talase frekvencije 0,4-2,2 MHz. Lokalno akumulira toplotu duboko u dermisu. Ovim se ubrzava lokalni krvotok i stimuliše stvaranje novog kolagena u tkivu. Veoma brzo se poboljšava tekstura i tonus kože. Cilj tretmana je da se koža, potkožno tkivo i mišići aktiviraju da dođe do bolje odbrane od štetnih spoljnih uticaja, kao i da se uspori prirodni proces starenja. Blagotvorni efekti su vidljivi i prepoznatljivi već nakon prve serije tretmana.

APARAT HX-W7

OPIS APARATA

Komplet **HX-W7** se sastoji od

- Aparata za radio-talasni lifting (u daljem tekstu *aparat*)
- Radio-talasnih glava (u daljem tekstu *radio-talaska glava*)

Na zadnjoj strani aparata se nalazi

- Prekidač za mrežno napajanje **ON/OFF**
- Kabl mrežnog napajanja

Na prednjoj strani aparata se nalazi

- *Soft-touch* taster za početak/završetak rada **START/STOP**
- *Soft-touch* taster za podešavanje vremena **TIME**
- Displej vremena tretmana (u **min**)
- Potencijometar za podešavanje programa **PROGRAM**
- Potencijometar za podešavanje intenziteta **INTENSITY**
- Utičnica radio-talaska glave

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priključiti kabl mrežnog napajanja u 220 V utičnicu, odnosno kabl radio-talaska glave u odgovarajuću utičnicu na prednjoj strani aparata.

Važna napomena: Klijent/pacijent **ne sme** biti u kontaktu sa metalnim predmetima (nameštaj, ...).

Važna napomena: Potencijometar **INTENSITY** podesiti na *minimalnu vrednost*, odnosno, u krajnje levi položaj.

Važna napomena: Za postizanje adekvatnog prenosa (transmisije) radio-talasa u tkiva, neophodan je kontaktni medijum (*gel*) između radio-talaska glave i kože. Kožu prvo očistiti od masnoća, premazati odgovarajućim *gelom* (parafinsko ulje, anticelulit gel, serum, ...), a zatim na nju direktno prisloniti radio-talasku glavu.

Postavljanje antene: Antena se postavlja izolovano od tela. Za terapiju lica, klijent/pacijent može sedeti ili ležati na anteni preko odeće (nije neophodan fizički kontakt sa kožom). U fizikalnoj terapiji, antena se

Aparat za radio-talasni lifting lica i tela (RTL)

postavlja tako da se između antene i radio-talasne glave nalazi tretirana površina (npr butina: antena se postavlja sa zadnje strane butine, dok se radio-talasnom glavom tretira prednja strana butine).¹

Pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani, uključiti aparat.

Soft-touch tasterom **TIME**, podesiti željeno vreme trajanja tretmana (displej pokazuje vreme u **minutima**). Potencijetrom **PROGRAM**, podesiti željeni program (v. *Uputstvo za upotrebu*).

Pritiskom na *soft-touch* taster **START/STOP**, počinje proces radio-talasnog liftinga. (**Napomena:** *Soft-touch* taster **START/STOP** je potrebno držati pritisnutim oko 2-3 sekunde, dok se ne pojavi zvučni signal).

Potencijetrom **INTENSITY**, podesiti intenzitet.

Nakon isteka vremena tretmana, aparat (radio-talasna glava) se automatski isključuje. Pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani, isključiti aparat. Za sledeći tretman, ponoviti prethodno opisan postupak.

Tretman se u bilo kom trenutku može prekinuti pritiskom na *soft-touch* taster **START/STOP**.

VAŽNA NAPOMENA: Zbog mogućnosti izazivanja kratkog spoja na radio-talasnoj glavi, ne koristiti previše gela tokom tretmana.

RADIO-TALASNE GLAVE

Aparat **RADIO-WAVE LIFTING HX-W7** ima mogućnost korišćenja 2 radio-talasne glave (manje površine za lice, odnosno veće površine za telo).

INDIKACIJE

Aparat **RADIO-WAVE LIFTING HX-W7** ima širok spektar primene u kozmetologiji i fizikalnoj medicini. Neke od osnovnih indikacija su:

- Uklanjanje celulita i masnih naslaga
- Eliminisanje strija
- Podmlađivanje lica
- Tamni kolutovi oko očiju
- Podočnjaci-kesice, bore, podbradak
- Promene nastale starenjem
- Promena svežine i jedrine kože lica

KONTRAINDIKACIJE

- Maligni procesi u organizmu
- Rahitične promene
- Sklonost ka krvavljenju
- Povišen krvni pritisak
- Oboljenja srca
- Ugrađeni pace-maker
- Prisustvo metala u telu

Tretmane ne raditi pri:

- Menstrualnom krvavljenju
- Graviditetu
- Dojenju

¹ Kod **tro-polnog RTL modela aparata**, antena je ubačena u radio-talasnu glavu.

Aparat za radio-talasni lifting lica i tela (RTL)

Kod žena, tretmane ne raditi:

- Donji stomak bez saveta sa lekarom
- Grudi bez saveta sa lekarom

UPOZORENJA

- Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu
- Nakon korišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Za vreme čišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Ne stavljati aparat na metalne površine i električne aparate
- Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tečnostima
- Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi
- Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece
- Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji oštećeni deo
- Ne skladištiti aparat na direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlagi
- Ne modifikovati i ne menjati neovlašćeno komponente aparata

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

- Aparat brisati isključivo suvom krpom, bez upotrebe sredstava za čišćenje
- Nakon svake upotrebe, radio-talasnu glavu obrisati krpom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	HX-W7
Napon napajanja	220 V, 50-60 Hz
Električna potrošnja	10 W
Podešavanje vremena	Da
Podešavanje intenziteta	Da
Broj radio-talasnih glava	3 (dvo-polni model)
Broj radio-talasnih glava	2 (tro-polni model)
Programi rada	5
LED dioda aktivnosti aparata	Da
Dimenzija (cm)	45 x 45 x 20
Težina kompleta (kg)	2

UPUTSTVO ZA PRIMENU

- **Važna napomena:** Zbog mogućnosti izazivanja kratkog spoja na radio-talasnoj glavi, ne koristiti previše gela tokom tretmana.
- **Program 0:** uvodna procedura za sve terapije. Vreme trajanja terapije 5-10 minuta.
- **Program 1:** koristi se za osobe mlađe od 30 godina. Vreme trajanja terapije lica je 5-10 minuta, a tela 10-15 minuta (zavisno od površine tretirane regije). Intenzitet se podešava do blagog zagrevanja kože (ne prelaziti vrednost intenziteta 6).
- **Program 2:** koristi se za osobe preko 30 godina. Vreme trajanja terapije zavisi od stanja kože i indikacija, oko 15-20 minuta. Intenzitet se podešava do blagog zagrevanja kože (ne prelaziti vrednost intenziteta 7).
- **Program 3:** koristi se za osobe preko 40 godina. Intenzitet i vreme trajanja terapije kao kod programa br. 2.
- **Program 4:** koristi se za osobe preko 50 godina i za fizikalnu terapiju. Vreme trajanja terapije zavisi od indikacija, oko 15 minuta. Intenzitet se podešava do blagog zagrevanja kože (ne prelaziti vrednost intenziteta 8).
- Preporučuje se da vreme između terapija iznosi 48 časova
- Ukupan broj terapija u ciklusu zavisi od indikacije, uobičajeno 3-10
- Vreme ponavljanja terapije iznosi 6 meseci.

Aparat za radio-talasni lifting lica i tela (RTL)

GARANTNI LIST

Marka aparata: **HAROX**

Naziv aparata: **RADIO-WAVE LIFTING**

Model aparata: **HX-W7**

Verzija aparata: **Standard / Premium**

Serijski broj:

Datum prodaje:

GARANTNA IZJAVA

- Isporučilac garantuje da će aparat ispravno funkcionisati, ukoliko se pravilno upotrebljava i održava prema uputstvu.
- Garantni rok iznosi **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium** računajući od datuma kupovine.
- Garancija je važeća ukoliko je ispravno popunjena i overena datumom prodaje, serijskim brojem aparata, pečatom i potpisom prodavca.
- Isporučilac se obavezuje da će u garantnom roku otkloniti sve nedostatke koji eventualno nastanu kod pravilne upotrebe aparata u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 60 dana (u toku popravke aparata garantni rok se produžava za taj period). Ukoliko isporučilac u garantnom roku ne otkloni eventualne funkcionalne nedostatke, obavezuje se da aparat zameni novim istog modela.
- Isporučilac se obavezuje da obezbedi rezervne delove najmanje 1 godinu nakon isteka garantnog roka.
- Garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko se pažljivo ne pročita uputstvo), oštećenja nastala tokom transporta do kupca, mehanička oštećenja, oštećenja prouzrokovana elementarnim nepogodama, ekstremnim temperaturama, uticajem vlage i hemikalija, oštećenja usled nestanka ili dolaska mrežnog napona dok je aparat uključen, kao i ukoliko aparat otvaraju, popravljaju ili prepravljaju neovlašćena lica.
- Garancija ne pokriva potrošne delove aparata (trake, prostirke, sunđere, glave, pincete, elektrode, kablove sa pripadajućim džekovima i štipaljkama i dr). Garancija nije važeća u slučaju nenamernog ili namernog kratkospajanja elektroda (ili štipaljki) dok je aparat uključen.
- Garancija ne važi (i proizvođač ne snosi odgovornost) za korišćenje aparata u svrhe izvan njegove namene. Proizvođač nije odgovoran za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje aparata moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.
- Za sve informacije i reklamacije molimo Vas da se obratite ovlašćenom serviseru.

Ovlašćeni servis:

065/227-15-15

Potpis i pečat prodavca