

SKIN SCRUBBER

HX-C4

APARAT ZA ULTRAZVUČNI PILING LICA I TELA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Aparat za ultrazvučni piling lica i tela

UVOD

Aparat **SKIN SCRUBBER HX-C4** je mikroprocesorski kontrolisan aparat za ultrazvučni piling lica i tela. Koriste se za profesionalnu upotrebu u kozmetičkim salonima.

Kvalitet **SKIN SCRUBBER HX-C4** aparata potvrđen je garantnim rokom od **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium**.

ČIŠĆENJE KOŽE

Aktivne materije koje se utrljavaju ili unose jontoforezom u tkivo, ne dospevaju u kožu u dovoljnoj količini, iako ih koža upija, jer postoji posebna barijera u epidermu. Ova barijera je prirodni proizvod organizma i štiti kožu od spoljašnjih uticaja.

SKIN SCRUBBER HX-C4 aparat pomaže da se zaobiđe barijera i da neophodni sastojci prodru duboko u kožu kako bi je učinili čistijom i mekšom.

Prirodan proces čišćenja kože se naziva keratizacija (ciklus keratizacije je svakih mesec dana). Keratizacija je proces koji ćelije kože u formi perutanja ili prljavštine od naslaga mrtve kože, u nižem sloju epiderma pomera ka višem delu epiderma. Nakon pomeranja i perutanja, keratizacija omogućava nesmetani rast novih ćelija kože, a sam taj postupak predstavlja prirodnu zaštitu kože od mikroba i drugih štetnih materija. Aparat **SKIN SCRUBBER HX-C4** ultrazvučnim talasima pospešuje proces keratizacije, a samim tim i proces izlečenja ili ulepšavanja kože. Keratizacija zauzima važnu ulogu u održavanju i smirivanju kože, tj. održavanju njene glatkoće, svežine i čistoće.

APARAT HX-C4

OPIS APARATA

Komplet **HX-C4** se sastoji od

- Aparata za ultrazvučni piling (u daljem tekstu *aparat*)
- Ultrazvučne špatule (u daljem tekstu *ultrazvučna glava*)
- Kontrolne elektrode

Na zadnjoj strani aparata se nalazi

- Prekidač za mrežno napajanje **ON/OFF**
- Kabl mrežnog napajanja

Na prednjoj strani aparata se nalazi

- Crvena LED dioda aktivnosti aparata **POWER ON**
- Potenciometar za podešavanje intenziteta galvanske struje **G-INTENSITY**
- Potenciometar za podešavanje intenziteta ultrazvučnih talasa **U-INTENSITY**
- Utičnica ultrazvučne glave

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priključiti kabl mrežnog napajanja u 220 V utičnicu, odnosno kabl ultrazvučne glave (ili kabl galvanske struje) u odgovarajuću utičnicu na prednjoj strani aparata.

Važna napomena: Potenciometre **INTENSITY** podesiti na *minimalne vrednosti*, odnosno, u krajnje levi položaj.

Aparat za ultrazvučni piling lica i tela

Pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani, uključiti aparat (pri čemu crvena LED dioda **POWER ON** konstantno svetli).

Korišćenje galvanske struje: Potencijometrom **G-NTENSITY**, podesiti željeni intenzitet galvanske struje (do praga osećaja, bez peckanja), uz držanje kontrolne elektrode u ruci.

Korišćenje ultrazvučne glave: Potencijometrom **U-NTENSITY**, podesiti željeni intenzitet ultrazvučnih talasa. U zavisnosti od namene, ultrazvučnu glavu pomerati po tretiranoj površini (v. *Uputstvo za primenu*).

Nakon isteka vremena tretmana, pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani, isključiti aparat, čime se gasi crvena LED dioda **POWER ON**. Za sledeći tretman, ponoviti prethodno opisan postupak.

Tretman se u bilo kom trenutku može prekinuti pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani aparata, uz predhodno podešavanje intenziteta galvanske struje i ultrazvučne glave na *minimalnu vrednost* (krajnje levi položaj).

FREKVENCIJA

Frekvencija ultrazvučnih talasa je izražena **kHz**. Aparat **SKIN SCRUBBER** ima fiksnu frekvenciju ultrazvučnih talasa, koja iznosi **24 kHz**.

INTENZITET

Intenzitet galvanske struje predstavlja jačinu električnih signala, izražen je u **mA**, i podešava se potencijometrom **G-INTENSITY**.

Intenzitet predstavlja snagu ultrazvučnih talasa po jedinici površine, i podešava se potencijometrom **U-INTENSITY**.

INDIKACIJE

Aparat **SKIN SCRUBBER** ima širok spektar primene u kozmetologiji. Neke od osnovnih indikacija su:

- Čišćenje kože
- Oslobađanje štetnih materija
- Stvaranje novih ćelija
- Ubacivanje hranljivih materija
- Povećanje elasticiteta

UPOZORENJA

- Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu
- Nakon korišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Za vreme čišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Ne stavljati aparat na metalne površine i električne aparate
- Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tečnostima
- Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi
- Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece
- Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji oštećeni deo
- Ne skladištiti aparat na direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlazi
- Ne modifikovati i ne menjati neovlašćeno komponente aparata

Aparat za ultrazvučni piling lica i tela

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

- Aparat brisati isključivo suvom krpom, bez upotrebe sredstava za čišćenje
- Nakon svake upotrebe, špatulu obrisati krpom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


	HX-C4
Napon napajanja	220 V, 50-60 Hz
Električna potrošnja	10 W
Izlazna struja (Galvanska)	0 – 10 mA
Frekvencija	24.000 Hz
Podešavanje intenziteta	Da
Broj špatula	1
LED dioda aktivnosti aparata	Da
Dimenzija (cm)	20 x 20 x 10
Težina kompleta (kg)	1

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Primeri primene aparata, prikazani su na sledećim slikama.



Aparat za ultrazvučni piling lica i tela

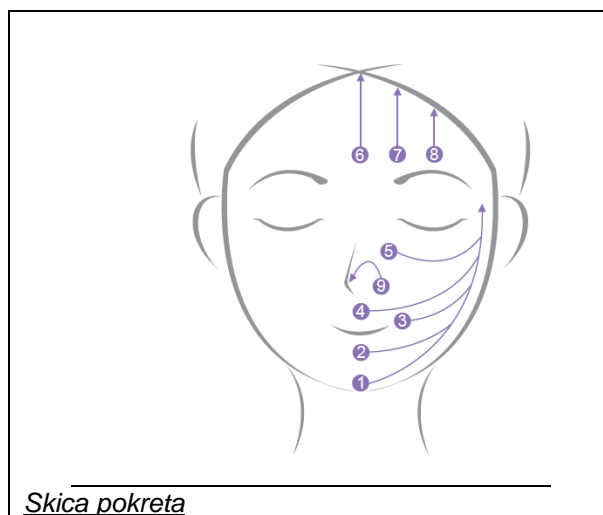

Aparat za ultrazvučni piling lica i tela

GARANTNI LIST

Marka aparata: **HAROX**
Naziv aparata: **SKIN SCRUBBER**
Model aparata: **HX-C4**
Verzija aparata: **Standard / Premium**
Serijski broj:
Datum prodaje:

GARANTNA IZJAVA

- Isporučilac garantuje da će aparat ispravno funkcionisati, ukoliko se pravilno upotrebljava i održava prema uputstvu.
- Garantni rok iznosi **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium** računajući od datuma kupovine.
- Garancija je važeća ukoliko je ispravno popunjena i overena datumom prodaje, serijskim brojem aparata, pečatom i potpisom prodavca.
- Isporučilac se obavezuje da će u garantnom roku otkloniti sve nedostatke koji eventualno nastanu kod pravilne upotrebe aparata u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 60 dana (u toku popravke aparata garantni rok se produžava za taj period). Ukoliko isporučilac u garantnom roku ne otkloni eventualne funkcionalne nedostatke, obavezuje se da aparat zameni novim istog modela.
- Isporučilac se obavezuje da obezbedi rezervne delove najmanje 1 godinu nakon isteka garantnog roka.
- Garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko se pažljivo ne pročita uputstvo), oštećenja nastala tokom transporta do kupca, mehanička oštećenja, oštećenja prouzrokovana elementarnim nepogodama, ekstremnim temperaturama, uticajem vlage i hemikalija, oštećenja usled nestanka ili dolaska mrežnog napona dok je aparat uključen, kao i ukoliko aparat otvaraju, popravljaju ili prepravljaju neovlašćena lica.
- Garancija ne pokriva potrošne delove aparata (trake, prostirke, sunđere, glave, pincete, elektrode, kablove sa pripadajućim džekovima i štipaljkama i dr). Garancija nije važeća u slučaju nenamernog ili namernog kratkospajanja elektroda (ili štipaljki) dok je aparat uključen.
- Garancija ne važi (i proizvođač ne snosi odgovornost) za korišćenje aparata u svrhe izvan njegove namene. Proizvođač nije odgovoran za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje aparata moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.
- Za sve informacije i reklamacije molimo Vas da se obratite ovlašćenom serviseru.

Ovlašćeni servis:

065/227-15-15

Potpis i pečat prodavca